

Achimed

Achillessehnenbandage
Achilles tendon support
Chevillère pour le talon d'Achille
Vendaje tendón de Aquiles



Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató.
Navodila za uporabo. Návod na použitie. 使用说明.



1



2



3



4

Achimed

Назначение

Achimed представляет собой бандаж для ахиллова сухожилия. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения ахиллова сухожилия; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Показания

- Острое и хроническое воспаление ахиллова сухожилия
- Воспаление после травм и операций
- Ахиллодиния
- Ахиллобурсит

Противопоказания

Окклюзии артерий, флебиты, венозные язвы, состояние после тромбоза вен. При варикозной болезни и постоянном отеке нижней конечности следует одновременно с бандажом носить медицинский компрессионный чулок до колена (A-D).

Принцип действия

- Компрессионная ткань и силиконовый вкладыш массируют область сустава, ускоряя заживление.
- Мягкий силиконовый вкладыш защищает ахиллово сухожилие.
- Съемные подпяточники уменьшают болезненное напряжение ахиллова сухожилия. По мере достижения лечебного эффекта можно (по указанию врача) иногда вынимать подпяточники, что позволит

ахиллово сухожилию адаптироваться к исходному уровню напряжения.

Рекомендации по применению

Максимальный лечебный эффект при использовании Achimed достигается в том случае, когда голеностопный сустав находится в движении. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Рекомендации по надеванию

- Бандаж надеть правильно, если шов проходит по середине пятки, а ахиллово сухожилие располагается в вырезе силиконового вкладыша.
- Выверните верхнюю часть бандажа наружу до силиконового вкладыша (рис. 1).
 - Возьмите бандаж за середину силиконового вкладыша. Натяните бандаж на стопу так, чтобы пятка оказалась в правильном положении (вкладыш должен окружать ахиллово сухожилие) (рис. 2).
 - Разверните верхнюю часть бандажа и, по необходимости, подтяните его (рис. 3+4).
-

Рекомендации по уходу

- Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.
- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким

моющим средством без использования ополаскивателя.

- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, предохранять от воздействия прямого солнечного света.

Материалы

Полиамид, Полиэстер, эластан, вискоза

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!