




medi SAS[®] 15

Schulterabduktionsschiene
Shoulder abduction splint
Orthèse d'abduction de l'épaule
Férula para abducción de hombro

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкція по використанню.
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Інструкція з
використання.

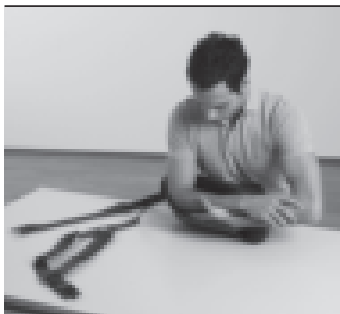

1



2



3



4



5



6

medi SAS® 15

Назначение

Отводящая шина medi SAS 15 может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

Показания

- Состояние после операции на вращающей манжете плеча
- Послеоперационная иммобилизация после артроскопического удаления отложений кальция на вращающей манжете плеча и после декомпрессии субакромиального пространства (по Neer) при плечелопаточном болевом синдроме
- Консервативная или послеоперационная декомпрессия субакромиального пространства при острых или хронических бурситах
- Уменьшение напряжения компонентов капсулы плечевого сустава после открытой или артроскопической стабилизации
- Иммобилизация верхней конечности при вывихе плеча

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Важное замечание

Угол отведения можно изменять только по рекомендации врача.

Инструкция по наложению

Снятие и наложение следует, по возможности, производить на столе. При этом соблюдайте следующие рекомендации по надеванию:

застежки-липучки на передней стороне подушки, а также петли должны быть расстегнуты. Плечевой и набедренный ремни положите на стол, чтобы они были под рукой.

1. Поместите прооперированную руку в расстегнутый карман таким образом, чтобы кисть находилась на мяче (рис. 1).
2. Затем застегните все петли (рис. 2).
3. Оберните набедренный ремень вокруг тела и застегните его спереди (рис. 3).
4. Перекиньте плечевой ремень через здоровое плечо по направлению вперед и поместите руку в отверстие между плечевым и подмышечным ремнями. Теперь застегните застежку-липучку.

В целом, изделие должно применяться под руководством врача, а первое наложение – сопровождаться указаниями квалифицированного персонала, прошедшего соответствующее обучение, например, специалиста по ортопедической технике. Индивидуальная подгонка квалифицированным специалистом обеспечивает эффективность и удобство в применении. Применение одновременно с другими изделиями следует согласовать с лечащим врачом.

Рекомендации по уходу

Не носить изделие в воде. Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла, кремы или мази могут вызвать раздражение кожи и износ материала.

- Стирайте наволочки, карманы и ремни предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.

- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

пенополиуретан, полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!